

ANKYLOS®

DENTSPLY
FRIADENT

Custom abutments by Compartis®

De nouvelles possibilités prothétiques grâce à des piliers personnalisés conçus en CFAO

Parallèlement aux solutions prothétiques ANKYLOS® actuelles pour les édentements unitaires ou multiples, vous avez désormais la possibilité pour des implants ANKYLOS® C/X de choisir des piliers monoblocs personnalisés conçus en CFAO (A commander via DeguDent). Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande souplesse et vos résultats seront plus esthétiques et plus fonctionnels.

Flexibilité et très grande précision

Les piliers personnalisés « custom abutments » ANKYLOS® C/X sont conçus en fonction des patients. A partir du projet conçu par l'ordinateur, il est possible de personnaliser l'angulation et la forme du pilier, par ex. en lui donnant une forme correspondant à la forme en réduction de la dent, à l'image d'un moignon. La géométrie de la connexion avec les tolérances admises est usinée en FAO selon les dimensions originales ce qui garantit une adaptation parfaite entre l'implant et le pilier. La vis est soudée au laser selon un procédé spécifique.

Gestion optimisée des tissus mous

Le profil d'émergence du pilier personnalisé ANKYLOS® C/X peut être adapté à chaque cas clinique. Vous pouvez faire réaliser par le laboratoire une vis de cicatrisation ou prendre une empreinte pendant l'intervention et éviter le changement de pilier. De ce fait, les tissus mous sont mis en forme avec le pilier personnalisé ANKYLOS® C/X directement après la mise à nu, ce qui leur assure une grande stabilité.

Esthétique naturel

Les piliers personnalisés ANKYLOS® C/X peuvent être conçus soit en titane soit en zircone. Les piliers en zircone sont proposés dans les teintes du pilier CERCON® Balance.

Un vrai gain de temps

Les piliers personnalisés n'ont pas besoin d'être retouchés. Ils peuvent être fraisés exactement à la forme souhaitée et posés directement en bouche dès leur réception.



NOUVEAU

Préfabriqué

ANKYLOS®

Balance Anterior C/
CERCON® Balance C/
Regular C/ ou /X



Custom-made *monobloc*

ANKYLOS®

custom abutment
by Compartis®



Implant ANKYLOS® C/X



1 | Dentiste

Prise d'empreinte

Une empreinte extrêmement précise (par ex. avec Aquasil) est indispensable pour garantir le succès de la procédure. La technique à ciel ouvert est conseillée.



2 | Laboratoire de prothèse

Modèle et maquette en cire


Sur la base de l'empreinte, le laboratoire confectionne le modèle et réalise le montage des dents.



3 | Laboratoire de prothèse

Numérisation avec Cercon® eye


Le modèle et la maquette en cire sont numérisés avec le scanner Cercon® eye.

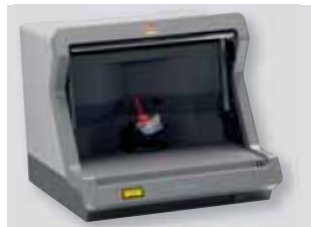

4 | Laboratoire de prothèse

Conception avec Cercon® art

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Le logiciel vous permet de personnaliser les ANKYLOS® C/X custom abutments. Seule la géométrie de connexion est préconfigurée.



5 | Compartis®

Production FAO

La commande de fabrication est envoyée par un « clic » au centre d'usinage Compartis® (DeguDent). Vos piliers personnalisés ANKYLOS® C/X en zircone ou titane sont usinés avec une extrême précision.

6 | Laboratoire de prothèse

Fabrication de la couronne/ du bridge

A réception du pilier, le laboratoire fabrique la couronne ou le bridge.

7 | Dentiste

Pose

Le pilier personnalisé et la couronne/bridge sont posés comme à l'accoutumée par le dentiste.

Géométrie de connexion	Matériau	Indication	
		Dent antérieure	Dent postérieure
ANKYLOS® C/	Zircone	•	
ANKYLOS® C/	Titane	•	•
ANKYLOS® /X	Titane	•	•

• en préparation

Les XiVE® custom abutments by Compartis® sont également disponibles.

Pour de plus amples informations sur Cercon® et Compartis®, veuillez vous adresser à votre distributeur local DeguDent.

N° de commande 6-703041/001

Distributeur Belgique : DENTSPLY Friadent Benelux NV/SA · Mechelsesteenweg 185-187 · 2540 Hove
Téléphone 03/458.41.71 · Télécopie 03/458.09.32 · E-mail: info@friadent.be

Distributeur France : DENTSPLY France SAS · Division Friadent · Route de Montereau · 77140 Darvault
Téléphone 01.60.55.55.45 · Télécopie 01.60.55.55.49 · E-mail: ParisFriadent@dentsply.com

Distributeur Suisse : Friadent Schweiz AG · Weyermattstrasse 4 · 2560 Nidau
Téléphone 0 32/3 32 92 10 · Télécopie 0800/845 845 · E-mail: info@friadent.ch

Fabricant selon directive CE 93/42/CEE: Custom abutments by Compartis®
DeguDent GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang

Implants et piliers préfabriqués : Friadent GmbH · B.P. 71 01 11 · 68221 Mannheim/Germany

www.dentsply-friadent.com