

ACHTUNG: Kompatibilität ANKYLOS[®] C/X Implantate:

Der Appendix "C/X" steht für die Option das Implantat allein mit der Konusverbindung ("C/") zu gebrauchen, oder den Index ("/X") zu nutzen, um den Aufbau ohne Übertragungsschlüssel zurückzusetzen. Der Index ist eine Findungshilfe, die Rotationssicherung und Stabilität gewährleistet die Konusverbindung. ANKYLOS[®] C/X Implantate dürfen nur mit Komponenten kombiniert werden, die mit "C/X", "C/" oder "/X" lasermarkiert sind, oder folgenden Produktgruppen angehören: Balance anterior und posterior Aufbauten, CERCON[®] Balance, Provisorische Aufbauten Balance, Sulkusformer Balance anterior und SynCone[®] Aufbauten. Die Verwendung von nicht kompatiblen Komponenten kann zu Passungsproblemen, Herabsetzung der Dauerfestigkeit oder Beschädigung des Implantates führen.