

ATENCIÓN: Compatibilidad de los implantes ANKYLOS® C/X:

El apéndice “C/X” hace referencia a la posibilidad de utilizar el implante únicamente con la conexión cónica (“C”) o aprovechar el indexado (“/X”) para insertar el pilar sin llave de transferencia. El indexado es una ayuda de orientación, el efecto antirrotatorio y la estabilidad son aportados por la conexión cónica. Los implantes ANKYLOS® C/X sólo deben ser combinados con componentes que presentan las marcas “C/X”, “C/” o “/X” grabadas con láser o que pertenezca a uno de los siguientes grupos de productos: pilares Balance anterior y posterior, CERCON® Balance, pilares provisionales Balance, moldeadores gingivales Balance anterior y pilares SynCone®. La utilización de componentes no compatibles puede conducir a problemas de ajuste, reducción de la resistencia a largo plazo o daños en el implante.